

AIRPRO-1000 (Purificateur mobile)

Purificateur et désinfecteur d'air plasma – Secteur médical

Manuel d'utilisation

Sommaire

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| 1. Présentation du produit..... | 1 |
| 2. Champ d'application..... | 1 |
| 3. Comment utiliser le produit ?..... | 1 |
| 4. Caractéristiques du produit..... | 1 |
| 5. Installation..... | 2 |
| 6. Notes de sécurité sur l'utilisation..... | 3 |
| 7. Entretien..... | 3 |
| 8. Résolution des problèmes..... | 4 |
| 9. Service après-vente..... | 5 |
| 10. Stockage..... | 6 |
| 11. Contenu de la livraison..... | 6 |
| 12. Carte de garantie..... | 7-8 |

1. Présentation du produit

Le produit est composé d'un filtre primaire, d'un ventilateur et d'un module de désinfection plasma. Le ventilateur fait circuler l'air dans le purificateur tandis que le plasma se charge de le désinfecter. Après que l'air ait bien circulé dans la pièce, cette dernière est désinfectée.

Principal moyen de désinfection : Plasma

Cible principale : Les agents pathogènes sont éliminés par le plasma haute tension.

Micro-organisme visé : Micro-organismes présents dans l'air.

2. Champ d'application

Applicable dans les établissements médicaux, les lieux publics et privés.

3. Comment utiliser le produit ?

Mettre la machine en route en continu pendant plus de 60 minutes pour désinfecter l'air, dans un espace clos de 100m² maximum, à température ambiante et avec une humidité de 80% maximum.


Pour une utilisation plus avancée, référez-vous au Guide de démarrage rapide.

4. Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Modèle | AIRPRO-1000 |
| Dimensions (mm) | 325x420x825 |
| Poids (kg) | 23 |
| Intensité du champ de plasma (KV) | 8 |
| Zone applicable (m ²) | 100 |
| Durée optimale d'utilisation (min) | ≥60 |
| Puissance (W) | 118 |

5. Installation

Cet appareil est mobile et peut être utilisé dans diverses pièces. L'emplacement où se trouve l'appareil doit être assez robuste pour supporter le poids de ce dernier et ne doit pas être exposé aux vibrations. Tenez l'appareil à distance de toutes sources de chaleur ou de vapeur, sinon l'entrée et la sortie d'air seront bloquées. Choisir un endroit où l'air peut se diffuser facilement dans tous les coins de la pièce, proche de la prise électrique.

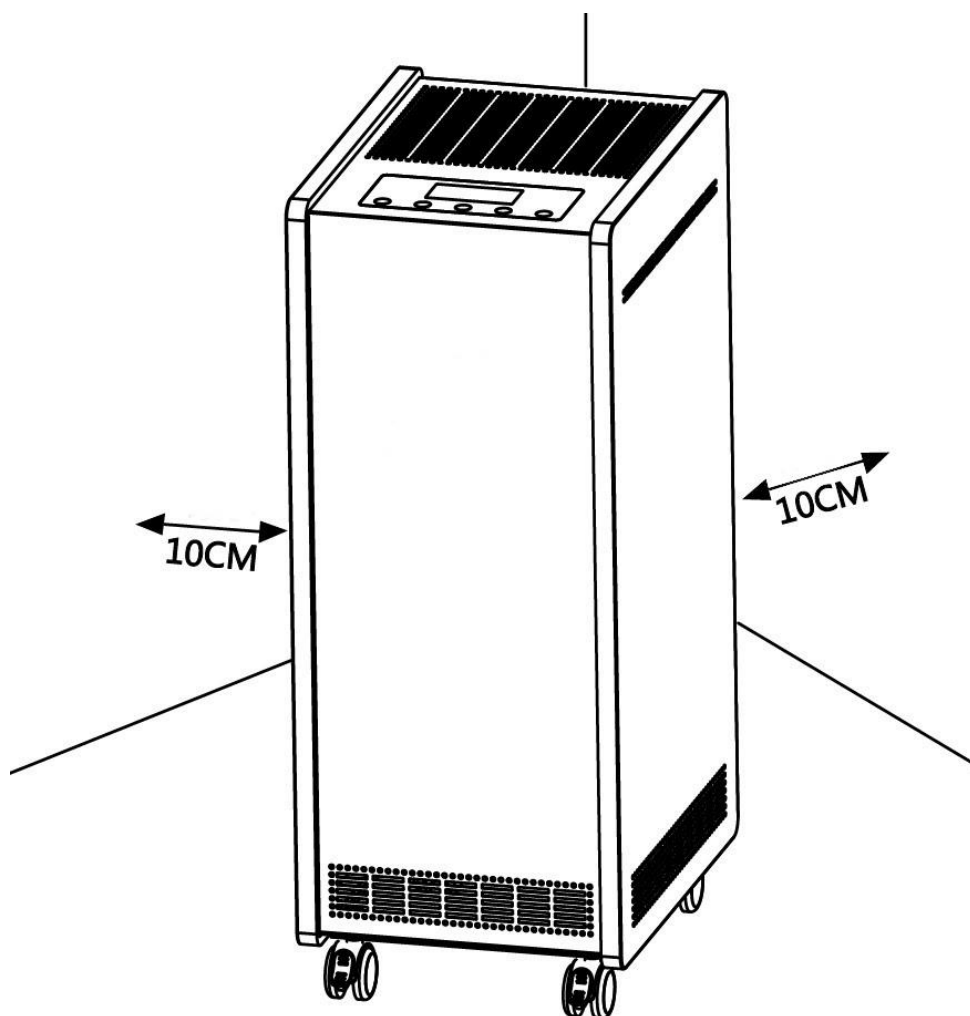

6. Notes de sécurité sur l'utilisation

- A. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de vous servir de la machine.
- B. Choisissez une prise électrique standard 220V à trois broches. Assurez-vous qu'elle soit branchée sur le sol.
- C. Ne pas installer de pièces d'autres marques sur la machine.
- D. Coupez l'alimentation électrique avant de faire la maintenance.
- E. Ne pas humidifier la machine durant la maintenance afin d'éviter tout dysfonctionnement et/ou panne.
- F. Le bruit de crépitement est normal concernant le champ de plasma à haute tension. Toutefois, un bruit de crépitement continu est anormal. Veuillez nous contacter pour avoir des conseils d'entretien.
- G. La maintenance doit être réalisée par des professionnels.
- H. Lorsque vous déplacez l'appareil sur un sol plat, poussez doucement la partie centrale de l'appareil.
- I. Faites attention aux roulettes ainsi qu'à leur protection quand vous montez et vous descendez d'un ascenseur. Soulevez légèrement un côté de l'appareil si cela est nécessaire.
- J. Lorsque vous montez ou vous descendez des escaliers ou que vous vous déplacez sur un sol ou terrain accidenté, pensez à soulever l'appareil.

7. Entretien

- A. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.
- B. Veuillez garder le système électrique au sec lors du nettoyage de l'appareil, afin d'éviter toute panne ou accident.
- C. Programme d'entretien :

| Parties | Programme(s) | | Méthodes |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| | Ordinaire | Très pollué* | |
| Filtre primaire | 12 mois | 6 mois | Ouvrir le couvercle latéral. Le nettoyer ou le remplacer. |
| Filtre HEPA | 2 ans | 1 an | Appelez-nous pour le remplacer |
| Générateur de plasma | 2 ans | 1 an | Appelez-nous pour cette maintenance. |

*Les lieux très pollués désignent les fumoirs, les pièces récemment décorées et les pièces situées près de sources de forte pollution comme une cheminée ou un site de construction.

8. Résolution des problèmes

Explications des codes d'erreur :

| Code d'erreur | Signification de l'erreur | Solution |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ventilateur | Coupez l'alimentation électrique et appelez-nous |
| 2 | Générateur de plasma | Coupez l'alimentation électrique et appelez-nous |
| 5 | Erreur sur le capteur de température/humidité | Coupez l'alimentation électrique et appelez-nous |
| 6 | Défaillance de communication | Coupez l'alimentation électrique et appelez-nous |
| 7 | Alarme de nettoyage (Temps de fonctionnement cumulé atteint : 1000 heures) | Coupez l'alimentation électrique et lavez le filtre primaire. Appuyez longuement sur le bouton "ESC" pour annuler l'alarme. |

Les problèmes que vous pourriez rencontrer et les solutions correspondantes :

| Problèmes | Solutions |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de sortie d'air après la mise en route de l'appareil | Veillez vérifier l'alimentation électrique et si des débris bloquent l'entrée et la sortie d'air. |
| Les boutons ne fonctionnent pas | Veillez vérifier si l'appareil est en mode "Sécurité enfant". Si c'est le cas, appuyez sur le bouton "Lock". |
| La télécommande ne fonctionne pas | Veillez vérifier si la bande isolante de la télécommande est retirée. |
| Bruit excessif | Veillez vérifier si des débris bloquent l'entrée et la sortie d'air. Vérifiez si le panneau est étanche. |

Veillez-nous appeler si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas.

9. Service Après-Vente

A. La durée de garantie du produit est de 2 ans à compter de la date de vente (la période de garantie dépend de la date du contrat de vente). Durant la période de garantie, si un dysfonctionnement est identifié comme étant un défaut de qualité de la part de notre société, nous fournirons une réparation gratuite. Si le dommage est un défaut de qualité mais trop important pour être réparé, alors nous remplacerons l'appareil.

B. Les consommables ne sont pas couverts par la garantie, le coût du matériel doit être pris en charge par le client.

C. Services hors garantie. Notre société fournira une maintenance des produits en continu. Le client devra payer les frais de maintenance et de matériel.

D. Si vous vous trouvez dans les situations suivantes, alors vous dépassez le cadre d'un service gratuit et la réparation vous sera facturée :

- a. Dommages causés par une utilisation, un entretien et/ou un stockage inapproprié par le client ;
- b. L'appareil entier ou des pièces ont dépassé la période de garantie ;
- c. Dommages causés par un démontage non réalisé par le personnel de notre société.
- d. La carte de garantie du produit est altérée ou le modèle de produit décrit sur la carte de garantie ne correspond au produit réel.
- e. Dommages causés par des désastres naturels ou autre évènement de force majeure.
- f. Dysfonctionnements ou dommages causés par des raisons accidentelles ou artificielles.

Afin de garantir vos droits et intérêts, vous devez nous contacter dans les 15 jours suivant la date d'achat s'il y a un problème de qualité sur le produit une fois déballé.

10. Stockage

Température de stockage : -35°C - +50°C

Humidité de stockage : maximum 80%

11. Contenu de la livraison

| No. | Éléments | Quantité | Tips |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1 | AIRPRO-1000 Machine médicale de désinfection plasma de l'air | 1 | |
| 2 | Guide de démarrage rapide | 1 | |
| 3 | Manuel d'utilisation | 1 | |
| 4 | Télécommande | 1 | |
| 5 | Certificat | 1 | |
| 6 | Câble d'alimentation | 1 | |

12. Carte de garantie

Nous vous remercions pour l'achat de ce purificateur d'air. Afin de bénéficier de notre service après-vente, veuillez conserver précieusement cette carte de garantie.

À compter de la date d'achat, le produit est garanti pendant 2 ans (à l'exception des consommables, tels que les filtres). Veuillez lire attentivement les termes de garantie ci-après :

1. Les informations saisies sur la carte de garantie par le client doivent être vraies.

2. La période de garantie du produit est de 2 ans. En cas de défaillance ou problème pendant la période de garantie, l'entreprise s'engage à réparer le produit gratuitement.

Si le produit ne peut pas être utilisé pour les raisons suivantes, il n'est pas

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS CLIENT | Nom et prénom : Numéro de contact : |
| | Nom du produit : Date d'achat du produit : |
| | Adresse mail : |
| | Description du défaut : |